

A vizsgálat komponensei



Győződjön meg arról, hogy a kit komponenseinek tételszáma (LOT száma) megegyezik.

LOT megegyezés

Ha az extrakciós puffercsövet hűtőszekrényben tárolják, közvetlenül a vizsgálat előtt tegye ki a mintagyűjtő csövet szobahőmérsékletre legalább 30 percre.

Vizsgálati beállítás

Vizsgálati folyamat

1 Helyezze be a vizsgálati tesztkazettát az i-Chamber nyílásába




1 Mérjen ki 400µl Higítószert




2 Mérje hozzá a detekciós puffer csőhöz



3 Mérje ki a teljes vérmintát

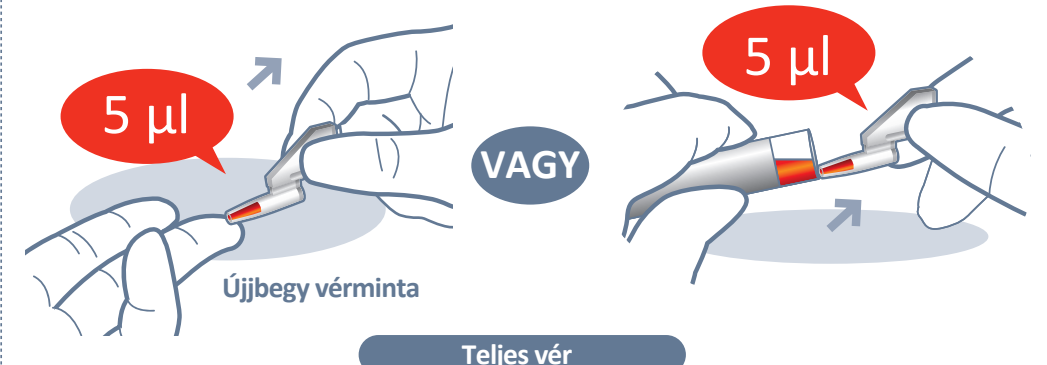


4 Helyezze a kapilláris csövet a detektor csőbe

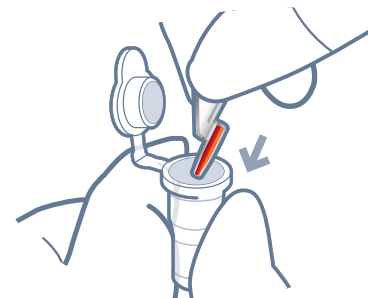

5 Rázza össze az azonosító csövet



6 Vegye ki félig a tesztkazettát

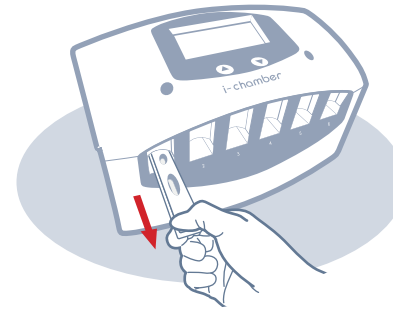

7 Mérjen ki 75µl mintakeveréket




8 Töltse be a tesztvályulatba a 75µl mintakeveréket




9 Helyezze be a tesztkazettát az i-Chamber slotjába és inkubálja a tesztkazettát 12 percig



10 Helyezze be a tesztkazettát az i-CHROMA LEOLVASÓ vagy az ichroma™ II készülékbe.

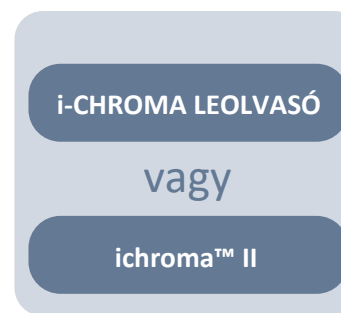

11 i-CHROMA LEOLVASÓ: Nyomja meg a "Select"-et* ichroma™ II: Koppintson a "Start"**-lehetőségre

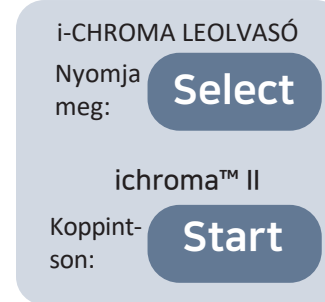

12 Olvassa le az eredményt



* Select = Kiválaszt
** Start = Elindít